

eyepiece™ &

TEARS  
AGAIN®

& **Blepha  
Cura**

**Kompetenz rund ums Auge**

eyepiece™  
**Lid-Massagehilfe**



**BlephaCura® liposomale Suspension zur täglichen Lidrandpflege und -hygiene**

- ✓ Ohne Tenside
- ✓ sehr gute Verträglichkeit
- ✓ bei Entzündungen der Lidränder

BlephaCura® Suspension  
PZN (DE): 0188073 | PZN (AT): 3754024  
Medizinprodukt

BlephaCura® Pads  
PZN (DE): 07646751 | PZN (AT): 3789755

BlephaCura® Wärme Gel Maske  
PZN (DE): 9300028 | PZN (AT): 3870888

[www.blephacura.de](http://www.blephacura.de)



**Tears Again® liposomales Augenspray bei brennenden und trockenen Augen**

- ✓ Bequeme Anwendung: einfach auf das geschlossene Auge sprühen
- ✓ Langanhaltende Wirkung bis zu 4 Std.
- ✓ Verbessert die Tränenfilmbstabilität
- ✓ Auch mit Kontaktlinsen und Make-up anwendbar
- ✓ Tears Again® Sensitive:
  - ohne Konservierungsmittel
  - mit Dexpanthenol bei empfindlicher Augenpartie

Tears Again® 10 ml  
PZN (DE): 03043582 | PZN (AT): 3726022  
Medizinprodukt

Tears Again® Sensitive 10 ml  
PZN (DE): 09727778 | PZN (AT): 3996141  
Medizinprodukt

[www.tearsagain.de](http://www.tearsagain.de)



**Tears Again® Augentropfen bei trockenen, müden und gestressten Augen**

- ✓ zur Befeuchtung der Augen
- ✓ ohne Konservierungsmittel
- ✓ mit hochwertiger Hyaluronsäure 1 mg/ml bzw. 3 mg/ml (GEL)
- ✓ mit allen Kontaktlinsen verträglich

TEARS AGAIN® Augentropfen GEL 10ml  
PZN (DE): 11034048 | PZN (AT): 4307149  
Medizinprodukt

TEARS AGAIN® Augentropfen 10ml  
PZN (DE): 09932225 | PZN (AT): 4030297  
Medizinprodukt

[www.tearsagain.de](http://www.tearsagain.de)

**optima**

Optima Pharmazeutische GmbH • Ludwigstr. 49 • 85399 Hallbergmoos  
Tel +49 (0) 811 / 555393-0 • Fax +49 (0) 811 / 555393-29  
info@optimapharma.de • www.optimapharma.de




**Lid-Massagehilfe zur unterstützenden Behandlung bei**  
✓ **Meibomdrüsen-Dysfunktion**  
✓ **Blepharitis**  
✓ **und dadurch verursachten Trockenen Augen**



PZN (DE): 11852901  
PZN (AT): 4489300

## „Häufigster Risikofaktor für die Entstehung eines Trockenen Auges ist die Meibom-Drüsen-Dysfunktion“.<sup>1</sup>

Die Augenlid-Massage ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung der Blepharitis und dem damit in Verbindung stehenden Trockenen Auge. Eyepeace wurde von Augenärzten entwickelt, um die Problematik der Meibomdrüsen-Dysfunktion (MDD), Trockener Augen, Blepharitis und Hagelkörner zu behandeln.

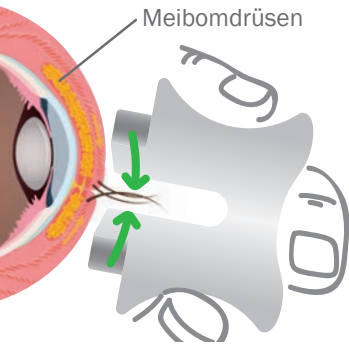

- Eyepeace wurde speziell entworfen, um die Meibomdrüsen in einer vertikalen Bewegung, in nichtinvasiver Weise, zu massieren. Dies trägt zur Linderung und Prävention des Trockenen Auges bei.
- Eyepeace ist einfach und komfortabel in der Anwendung
- Aus Silikon in medizinischer Qualität

### Persönliche Augenlid-Massagehilfe - Tipps für den Gebrauch

1. Anwendung einmal pro Tag, dabei jedes Augenlid zwischen 5-10 mal mit Eyepeace massieren. Hierbei die Lippen der Augen-Massagehilfe nicht „über dehnen“ bzw. zu weit öffnen (Abb. A). Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen.
2. Falls die Haut Ihrer Augenlider nicht straff genug ist, ziehen Sie diese vorsichtig nach oben in Richtung Stirn, bevor sie die Massagehilfe auf Ihre Lider aufsetzen (Abb. B).
3. Setzen Sie die Augen-Massagehilfe einfach auf das geschlossene Lid auf und drücken Sie diese sanft mit leichtem Druck etwas zusammen (Abb. C). Wiederholen Sie diesen Vorgang 5-10 mal pro Augenlid.

4. Die Massagehilfe sollte über die Augenlidhaut gleiten.
5. Falls das Augenlid während der Massage wiederholt umgestülpt bzw. zusammengequetscht wird, überprüfen sie, ob die lockere Augenlidhaut bereits ausreichend gestrafft wurde (siehe Punkt 2) und versuchen Sie, die Position der Massagehilfe auf dem Augenlid zu verändern.
6. Sie sollten bei der Massage keine Schmerzen verspüren.
7. Wenn Sie Schmerzen verspüren, reduzieren Sie den Druck bei der Massage.
8. Wenn Sie weiterhin Schmerzen verspüren, beenden Sie die Anwendung mit der Lid-Massagehilfe, und konsultieren Sie einen Augenarzt.
9. Sie sollten keine „Farben“ während der Massage des Augenlides sehen.
10. Nicht verwenden, wenn Sie vor kurzem eine Augenoperation hatten (nur nach Rücksprache mit Ihrem operierenden Arzt).
11. Bitte lesen und beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.



### Pflegeanweisung:

Waschen Sie Eyepeace vorsichtig mit mildem Seifenwasser, spülen und trocknen Sie es sorgfältig ab, bevor Sie es auf Ihren Augen anwenden.



PZN (DE): 11852901  
PZN (AT): 4489300

<sup>1</sup> BVA und DOG, Leitlinie Nr. 11, „Trockenes Auge“ (Sicca-Syndrom) und Blepharitis, 2015

