

Blepha Cura®

BlephaCura® Med Lidpflege

Pflege+Hygiene

Mit Liposomen

Sanfte tägliche Pflege und Reinigung für gereizte, empfindliche Lider und die Augenpartie. Dermatologisch und augenärztlich getestet. Sehr gute Verträglichkeit.

Spezielle Formulierung zur schonenden Entfernung von Ablagerungen, Sekreten, Verkrustungen und Schuppen.

Die tägliche Augenlidhygiene ist die wichtigste Maßnahme bei Reizungen und Blepharitis.

BlephaCura® Med:

- reduziert Rötungen der Augenlider
- verbessert die Hautfeuchtigkeit
- lindert Reizungen
- verbessert die Hautbeschaffenheit

Kann zur sanften Entfernung von Make-up verwendet werden.

Muss nach der Anwendung nicht von den Augenlidern abgespült werden.

BlephaCura® Med ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Es empfiehlt sich, die Kontaktlinsen erst nach der Anwendung einzusetzen.

Anwendung 2-mal täglich.

Ein fusselfreies Wattepad mit BlephaCura® Med befeuchten.

Damit das Oberlid von oben nach unten und das Unterlid von unten nach oben reinigen (jeweils zum Lidspalt hin). Entfernung von Ablagerungen, Schuppen und Krusten am Lidrand und an den Wimpern.

Für jedes Augenlid ein neues Wattepad verwenden.

Ingredients/Inhaltsstoffe

Aqua, Sodium Chloride, Lecithin, Phenoxyethanol, Alcohol, Retinyl Palmitate

Hinweise

Bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden. Diese kann in Form von Brennen, Rötung oder Juckreiz am Auge bzw. der Augenlider auftreten. Wenn bei Ihnen derartige Symptome auftreten, beenden Sie die Anwendung. Enthält Vitamin A (0,125 mg/ml). Berücksichtigen Sie Ihre tägliche Aufnahme vor der Anwendung.

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Nicht einfrieren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aussehen und Geruch

BlephaCura® Med ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opaleszente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin.

FREI VON

PEG, Paraben,
Tensiden

Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17
DE-85399 Hallbergmoos
blephacura.de